

BRENNTAG Hospitalssprit 70%

Godkendt til overfladedesinfektion i fødevarevirksomheder

Produktbeskrivelse:

BRENNTAGS hospitalssprit er godkendt til overfladedesinfektion i fødevarevirksomheder. Jf. Fødevarestyrelsens J.nr.: 2009-20-5409-00106.

- Baderum
- Skyllerum
- Køkken
- Laboratorium
- Fødevareproduktion

BRENNTAG Hospitalssprit 70% kan anvendes til desinfektion af alle hårde overflader, herunder kirurgiske instrumenter, og småt laboratorieudstyr.

Anvendes på klinikker og laboratorier til, eller ved desinfektion af udstyr som indgår i processer, som ikke tåler vand, eller til desinfektion hvis der blot er ønske om en hurtig fordampning af desinfektionsmidlet

Fordele:

Fraværet af denatureringsmiddel udover isopropylalkohol betyder at BRENNTAG Hospitalssprit 70% må anvendes til desinfektion af fødevarekontaktflader uden en efterfølgende skylleprocedure af den desinficerede overflade med rent vand. Dette er specielt relevant ved aftørring af prober/termometre.

Fremgangsmåde:

Overfladerne skal være synligt rene før desinfektion. Hospitalsspritten påføres ved hjælp af klud, serviet eller lignende. Kan også anvendes som spray.

Anvendelsesområder

Aftørring med hospitalsservietter nedsætter smitterisikoen fra fødevare- og hudkontaktflader i:

- Sengestuer
- Opholdsrum

Eksempler på anvendelse

Hospitalsservietter med ethanol anvendes til aftørring af:

- infusionspumper, stetoskoper, termometre, staseslanger, BT-apparat, hårtørrer, manometre, flowmetre.
- Fast panel udstyr og andet ikke vaskbart inventar.
- Dørhåndtag, radio, TV, bøger, stole, rengøringsgsspande og andet løst inventar.
- Køle-, og fryseskab, ismaskine.
- Sengeleje, puslepudder etc.

Deklaration:

Ethanol denatureret med 3,5 til 10,5 vo-% isopropanol. Total sprit indhold 70 vol-%.

Varenummer:

15374: Karton med 10 flasker á 1 L.

15373: Dunk á 5 liter pakket på palle med i alt 108 dunke